
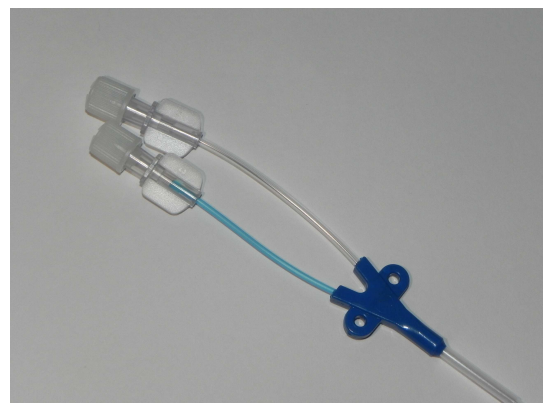


Datenblatt

Zystometrie-Katheter	UD-CY-082	/	UD-CY-062
Stärke	8 CH	/	6 CH
Länge	390 mm	/	280 mm
Lumen	2; 1 x Pves, 1 x Fülllumen		
Anwendungsbereich	Erwachsene	/	Kinder
PZN	6992422	/	6963372

Merkmale:

- An der Katheterspitze befinden sich je 5 Öffnungen für das Lumen Pves und das Fülllumen. Da es zu Beginn einer Untersuchung vorkommen kann, dass die einzelne Lumenöffnung herkömmlicher Katheter an der Blasenwand anliegt und dadurch keine Druckübertragung erfolgen kann, wird mit 5 Öffnungen diese Fehlermöglichkeit stark reduziert. Die 5 Öffnungen des Fülllumen bewirken einen Gießkannen ähnlichen Effekt der eine sanfte Füllung gewährleistet. Zusätzlich verbessern die 5 Öffnungen die Drainage-Funktion.
- Nach 12 cm Abstand von der Pves Lumenöffnung ist eine schwarze Markierung angebracht, die darauf hinweisen soll, dass die maximale Eindringtiefe erreicht ist. D.h. nach dem Einführen des Katheters in die weibliche Harnröhre soll diese Markierung unbedingt noch sichtbar sein.
- Die Zuleitungen sind farblich markiert: Blau = Pves, Weiß = Fülllumen.
- Zusätzlich befindet sich in der Sterilverpackung ein weiterer Schlauch mit Einwegventil, der zwischen Pumpenschlauch und Katheter angeschlossen wird. Dieser soll den Pumpenschlauch vor austretendem Urin aus dem Katheter schützen.

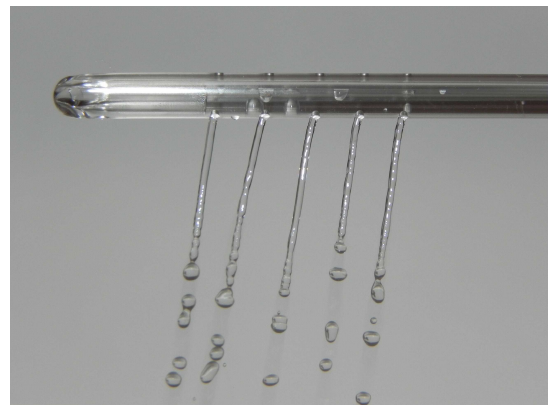

Weitere Informationen erhalten Sie von:

Urodirect GmbH
Eichenhausener Str. 21
82054 Sauerlach
Tel.: 08104 889111
Fax: 08104 889112
info@urodirect.de
www.urodirect.de